


DISPOSITIVO DESAFIO DE PROCESSO - PCD

— PCD-0105 —

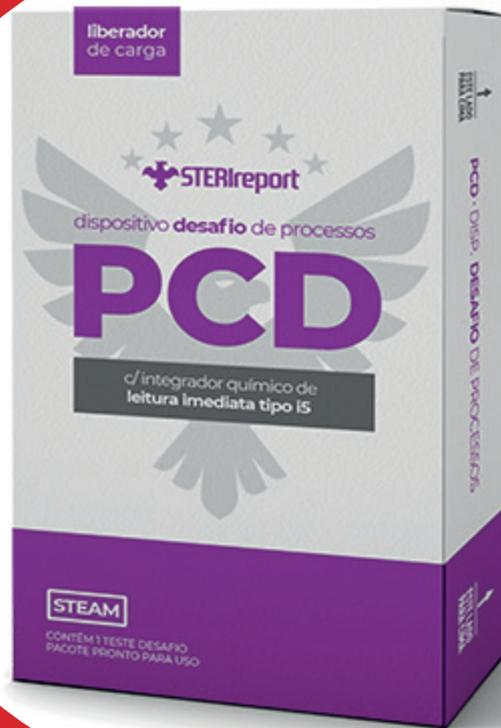

**LIBERADOR
DE CARGA**

**COM
TIPO I5**

SOBRE O PRODUTO

Para **Indicadores Químicos Tipo i5 STC-105**.

Conforme **AAMI ST79**.

Ótimo **Custo Benefício**.

Descartável.

Liberador **de Carga**.

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

ITEM#

EMBALAGEM

PCD-0105

UNIDADE





DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Pacote de teste desafio **com integrador químico STC-105 tipo i5** é um monitor de esterilização a vapor desenvolvido para apresentar um desafio ao processo de esterilização a vapor equivalente ao dispositivo desafio de processo de 16 toalhas (PCD) recomendado pela AAMI ST79.

Projetado para monitorar esterilizadores a vapor pré-vácuo operando a 134°C por no mínimo 3 minutos ou 121°C por no mínimo 18 minutos. O integrador químico tipo i5 possibilitará ao operador verificar as condições de esterilização instantaneamente, proporcionando assim uma liberação de carga rápida e segura.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

Quando exposto a ciclos de esterilização a vapor, o **integrador químico Tipo i5 STC-105** de leitura imediata muda a cor de **azul para preto** nas duas barras progressivas, isso significa que as condições necessárias para a esterilização a vapor foram atingidas, indicando um processo de esterilização aceitável e a morte biológica.

RESULTADOS ESPERADOS

STC-105: As barras indicadoras apresentarem mudança de coloração uniforme de **azul para preto**.

Etiqueta externa do PCD: a barra indicadora muda de **rosa para marrom**.

ESTABILIDADE DO INDICADOR QUÍMICO

Excelente antes do uso, e depois da esterilização é irreversível.

Tempo de Mudança de Cor ao atingir os parâmetros críticos:

VALOR DECLARADO: COMO DETALHADO EM UM RESISTÔMETRO (BIER VESSEL)

	135°C	134°C	132°C	121°C
PRIMEIRA BARRA	1 MIN	1,5 MIN	2 MIN	4 MIN
SEGUNDA BARRA	2,5 MIN	3 MIN	4 MIN	18 MIN

INSTRUÇÕES DE USO

1. Carregue o esterilizador normalmente.
2. Coloque o pacote de teste na área de maior desafio no esterilizador.
3. Processe a carga como recomendada pelo fabricante.
4. Remova o pacote do esterilizador e deixe-o esfriar.
5. Remova e examine o integrador tipo i5.
6. O PCD-0105 possui uma barra externa com indicador Tipo e1 que muda de rosa para marrom ou preto quando exposto ao vapor, indicando que ele já foi processado

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

1. Se tiver alguma dúvida sobre o resultado, os pacotes não devem ser considerados esterilizados.
2. Não utilize qualquer pacote PCD-0105 que a barra externa com indicador Tipo e1 não esteja rosa antes da exposição ao ciclo de esterilização a vapor.

VALIDADE - ARMAZENAMENTO - DESCARTE

A validade é de 24 meses. A data de validade, condições de armazenagem e descarte estão impressas na etiqueta externa do PCD.

NORMAS DE CLASSIFICAÇÃO

- Pacote de teste: ANSI / AMMI ST79
- Indicador Químico: ISO 11140-1

Registro no MS. Produto isento de registro no M.S. Conforme RDC 185/2001 e enquadramento sanitário como - Produtos não considerados produtos para a saúde.

