


# DISPOSITIVO DESAFIO DE PROCESSO - PCD

— PCD-0106 —

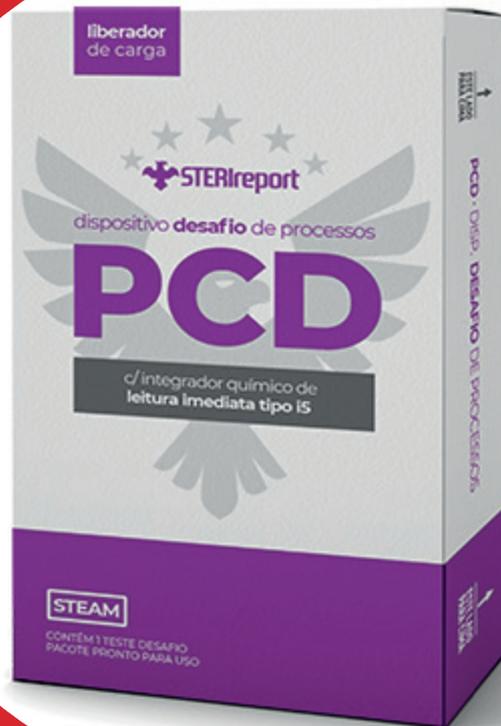

**LIBERADOR  
DE CARGA**

**COM TIPO I5  
PASTILHA**

## **SOBRE O PRODUTO**

Para **Indicadores Químicos Tipo i5 STC-106.**

Conforme **AAMI ST79.**

Ótimo **Custo Benefício.**

**Descartável.**

Liberador **de Carga.**

## **INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS**

ITEM#

EMBALAGEM

PCD-0106

UNIDADE





## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O **Pacote de teste desafio com integrador químico STC-106 tipo i5 pastilha** é um monitor de esterilização a vapor desenvolvido para apresentar um desafio ao processo de esterilização a vapor equivalente ao dispositivo desafio de processo de 16 toalhas (PCD) recomendado pela AAMI ST79.

Projetado para monitorar esterilizadores a vapor pré-vácuo operando a 134°C por no mínimo 3,6 minutos ou 121°C por no mínimo 16,5 minutos. O integrador químico tipo i5 pastilha possibilitará ao operador verificar as condições de esterilização instantaneamente, proporcionando assim uma liberação de carga rápida e segura.

## CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

Quando exposto a ciclos de esterilização a vapor, a barra indicadora do integrador químico STC-106 Tipo i5 pastilha transita, atingindo a janela **"APROVADO"**, isso significa que as condições necessárias para a esterilização a vapor foram atingidas, indicando um processo de esterilização aceitável e a morte biológica.

## RESULTADOS ESPERADOS

**STC-106 Tipo i5 pastilha:** A barra indicadora atinge a janela **"APROVADO"**.

**Etiqueta externa do PCD:** A barra indicadora muda de **rosa para marrom**.

## ESTABILIDADE DO INDICADOR QUÍMICO

Excelente antes do uso, e depois da esterilização é irreversível.

**Tempo de Mudança de Cor ao atingir os parâmetros críticos:**

VALORES DECLARADOS PARA O TEMPO DE ACEITAÇÃO DO INTEGRADOR NO PCD (EM UM ESTERILIZADOR HOSPITALAR COM BOMBA DE VÁCUO)	TEMPERATURA (°C)	TEMPO REQUERIDO PARA PASS - APROVADO
	121 °C	16,5 MIN.
134°C	3,6 MIN.	
135 °C	3 MIN.	

## INSTRUÇÕES DE USO

1. Carregue o esterilizador normalmente.
2. Coloque o pacote de teste na área de maior desafio no esterilizador.
3. Processe a carga como recomendada pelo fabricante.
4. Remova o pacote do esterilizador e deixe-o esfriar.
5. Remova e examine o integrador tipo i5 pastilha.
6. O PCD-0106 possui uma barra externa com indicador Tipo e1 que muda de rosa para marrom ou preto quando exposto ao vapor, indicando que ele já foi processado.

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

1. Se tiver alguma dúvida sobre o resultado, os pacotes não devem ser considerados esterilizados.
2. Não utilize qualquer pacote PCD-0106 que a barra externa com indicador Tipo e1 não esteja rosa antes da exposição ao ciclo de esterilização a vapor.

## VALIDADE - ARMAZENAMENTO - DESCARTE

A validade é de 24 meses. A data de validade, condições de armazenagem e descarte estão impressas na etiqueta externa do PCD.

## NORMAS DE CLASSIFICAÇÃO

- Pacote de teste: ANSI / AMMI ST79
- Indicador Químico: ISO 11140-1

**Registro no MS.** Produto isento de registro no M.S. Conforme RDC 185/2001 e enquadramento sanitário como - Produtos não considerados produtos para a saúde.

