



INTEGRADOR QUÍMICO TIPO i5 PARA ESTERILIZAÇÃO A ETO

– STC-143 –



CUSTO
BENEFÍCIO

Tipo i5

SOBRE O PRODUTO

Conforme **ISO 11140-1, Tipo i5 ETO.**

Mudança de coloração de **rosa para azul.**

Arquivamento **fácil e confiável.**

Ótimo **Custo Benefício.**

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

ITEM#	EMBALAGEM
STC-143	200 UNID



stericontrol.com



sac@stericontrol.com

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O STC -143 é um integrador químico Tipo i5, projetado para apresentar uma resposta íntegra de todos os parâmetros críticos de uma esterilização por gás de **Oxido de Etileno**.

MUDANÇA DE COR

Quando as condições de esterilização por O.E foram alcançadas as três barras mudaram de **rosa para azul**. Como determinado em um resistômetro O.E: **37,5 Minutos** por (54 ±1°C, 60 ±10% U.R, 600 ±30 mg/l)

INSTRUÇÕES DE USO

1. **Coloque um indicador STC-143** em cada pacote, envelope termo selante, bandeja para ser esterilizado por gás O.E. Para pacotes maiores coloque tiras em várias localizações no pacote.
2. **Evite** que as barras de indicador estejam cobertas ou bloqueadas.
3. **Esterilize o pacote** como recomendado pelo fabricante.
4. Após completo o ciclo de esterilização **verifique** se as três barras apresentam a mesma coloração azul que a barra interpretativa na extremidade do indicador.

PRECAUÇÕES

1. Não armazene próximo a agentes com gases oxidante, ácidos ou alcalinos
2. Proibir estritamente a exposição prolongada ao ar quando os indicadores contidos em pacote aberto.
3. Não use tiras indicadoras químicas de óxido de etileno para monitorar calor seco, vapor, ou outros processos de esterilização a baixa temperatura.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões: 9,5 cm X 1,5 cm

Armazenamento: Armazene em temperatura ambiente (5 a 25°C) e 35 a 60% de umidade relativa do ar.

Identificação: Lote e data de validade estão impressos no produto

*Não use o indicador químico após a data de validade.

ISENÇÕES

Isento de chumbo e metais pesados tóxicos.

CLASSIFICAÇÕES DE NORMAS


ISO 11.140-1 Indicador Tipo i5 para ETO.

INTERPRETAÇÃO





O STC-143 apresenta Três barras de tinta conforme a norma ISO 11140-1, Tipo i5 para ETO. O usuário pode determinar:

COMO LER UM TESTE TIPO i5 EO




NÃO PROCESSADO

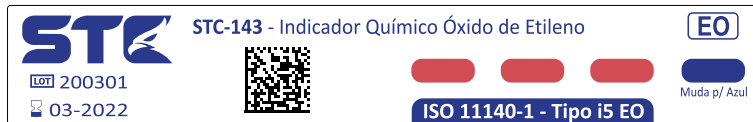

APROVADO

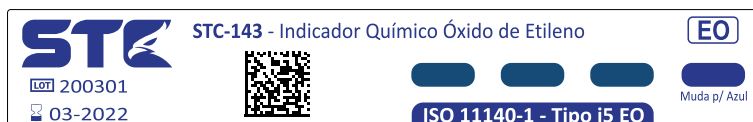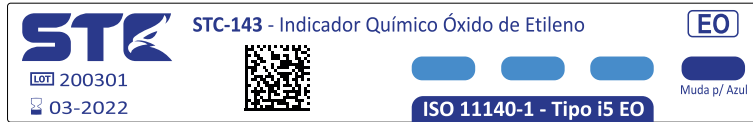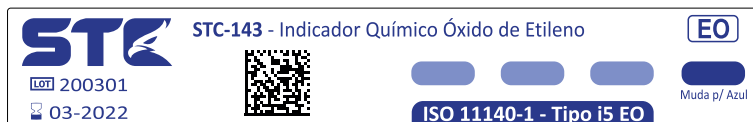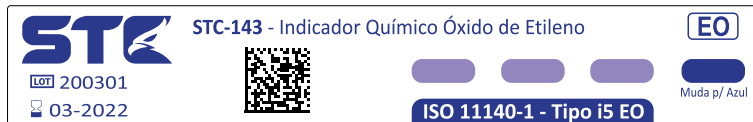

REPROVADO

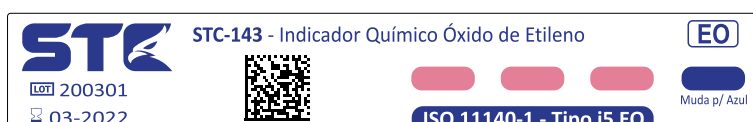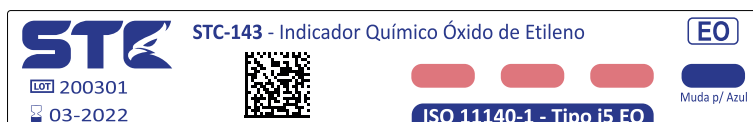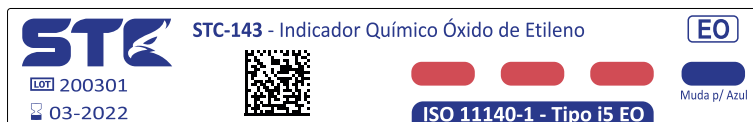

APROVADO

Um resultado de teste satisfatório é indicado quando as três barras rosa **mudam uniformemente para cor azul**, as condições de esterilização foram alcançadas demonstrando um (Nível de garantia de Esterilidade) SAL 10-6.

REPROVADO

As três barras rosa não **apresentarem uma mudança uniforme** de cor para azul, o artigo foi submetido a condições insuficientes de esterilização.

Registro no MS. Produto não considerado "Produto para Saúde" conforme Resolução - RDC. 185/2001 e enquadramento sanitário da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.