

INDICADOR DE LIMPEZA PARA LAVADORAS-DESINFETADORAS

— STC-W100 —



TEST
SOIL

- DESENVOLVIDO EM METAL
- SIMULA O INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

SOBRE O PRODUTO

O *test soil* conforme **ISO 15883-5:2021**.

Simula um instrumento cirúrgico contaminado .

Verifica a **efetividade da fase de lavagem** em Lavadora-Desinfetadora .

Ótimo **Custo Benefício**.

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

ITEM#	EMBALAGEM
STC-W100	PACOTE COM 50 UNIDADES



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O **indicador de limpeza STC-W100** foi projetado para verificar a efetividade do fluxo de água, tempo, temperatura e concentração de detergente no processo da fase de **termodesinfecção**, ou seja, é um teste desenvolvido para verificar a efetividade em lavadoras termodesinfectoras hospitalares. O teste apresenta uma lâmina metálica que **simula a superfície dos instrumentais cirúrgicos**, na sua estrutura é aplicado um **test soil de cor rosa**, que simula o sangue e tecidos orgânicos. Após processada, a lâmina deve apresentar a remoção do indicador, comprovando que o processo de lavagem foi eficaz.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Utilizando luvas, insira o **STC-W100 por completo dentro do suporte STC-W102**, de maneira que o indicador fique com o **test soil exposto na janela**. Seu conjunto (STC-W100 + STC-W102) simula um instrumento cirúrgico contaminado.
2. Posicione o conjunto (STC-W100 + STC-W102) **nos pontos de maior desafio** do equipamento.
3. Faça o processo **conforme validado**.
4. Após o término do ciclo, remova a lâmina do suporte para a análise do resultado. Se o ciclo de limpeza foi eficiente, a área **rosa do indicador deverá desaparecer**.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1. **Não toque o teste** com as mãos nuas.
2. **Use luvas, máscara cirúrgica** e outras medidas de higiene para evitar a contaminação de resíduos de proteínas da pele, com o *test soil*.
3. **Evite atrito** sobre a tinta indicadora.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões: 8,0cm x 2,60cm

Armazenamento: Armazene em temperatura ambiente (10 a 35°C) e 10 a 70% de umidade relativa do ar, após aberto mantenha o pacote com indicador STC-W100 fechado com Zip Lock.

Identificação: Lote e data de validade estão impressos no produto.

*Não use o indicador de limpeza após a data de validade.

CLASSIFICAÇÕES DE NORMAS

ISO 15883-5:2021

INTERPRETAÇÃO

O **STC-W100** apresenta um indicador test soil que simula o sangue e tecidos orgânicos conforme ISO 15883-5. O usuário pode determinar:

COMO LER UM
INDICADOR DE LIMPEZA
LAVADORA- DESINFETADORA

NÃO PROCESSADO



APROVADO



REPROVADO



APROVADO

Se o **test soil for removido completamente** da lâmina metálica o usuário pode determinar que **foram alcançadas as condições** ideais de limpeza da Lavadora Termodesinfetora (efetividade do jato de água, tempo de lavagem, temperatura e concentração do detergente utilizado). Caso permaneça uma imagem residual **incolor** pode-se considerar o teste aprovado.

REPROVADO

Se o **test soil não apresentar a remoção completa** da área do indicador, o usuário pode determinar que as **condições de limpeza não foram alcançadas**. Uma possível falha mecânica, tempo de lavagem, temperatura e concentração de detergente devem ser verificadas. Reprocesse o material, caso ocorra a falha novamente contate o serviço técnico do equipamento.

Registro no MS. Produto não considerado "Produto para Saúde" conforme Resolução - RDC. 185/2001 e enquadramento sanitário da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

